

**ПРОТОКОЛ**  
**забора образцов клеток буккального эпителия**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании определения \_\_\_\_\_ суда от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в зале заседания суда был осуществлен забор образцов клеток  
буккального эпителия с внутренней стороны щеки ватной палочкой у:

1. \_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. матери полностью, дата рождения)*
2. \_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. ребёнка полностью, дата рождения)*
3. \_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. отца полностью, дата рождения)*

Забор образцов осуществлялся лицами, участвующими в деле самостоятельно в присутствии:

4. \_\_\_\_\_  
*(должность, Ф.И.О.)*
5. \_\_\_\_\_  
*(должность, Ф.И.О.)*
6. \_\_\_\_\_  
*(должность, Ф.И.О.)*

По статьям 307, 308 УК РФ предупреждены

Подписи:

4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

Судья \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

---

**Инструкция по забору образцов клеток буккального эпителия**

1. Приобрести стандартные гигиенические ватные палочки. Используйте только новую, не вскрывавшуюся ранее, упаковку.
2. Человек, у которого будет проводиться забор образцов, должен прополоскать рот чистой кипячёной водой.
3. Взять ватную палочку за один конец и провести 20-30 раз противоположным концом палочки по внутренней поверхности щеки с лёгким нажимом для соскабливания эпителиальных клеток.
4. Отрезать и выбросить конец палочки, за который держались рукой.
5. Оставшуюся половину палочки, не высушивая опустить сразу в бумажный конверт, а затем, объединив пакеты с образцами клеток от всех участников экспертизы опустить в один бумажный конверт большего размера. Не допускается использовать полиэтиленовые пакеты! От каждого человека необходимо предоставить по две ватные палочки с образцами буккального эпителия. Образцы от разных людей должны быть в отдельных конвертах для исключения взаимного переноса биологического материала. Все конверты снабжаются идентифицирующими надписями (ФИО, дата, подпись) и отправляются в экспертное учреждение.